
	INSTRUCTIVO COVID19	Código: IT-COVID 009 Versión: 01
	USO DE TERMÓMETRO Y CONTROL DE TEMPERATURA	Fecha de vigencia: 20/07/2020 Páginas: 1 de 1

**DEFINICIONES:**

**Termómetro:** Equipo de medición de temperatura corporal.

**Lector infrarrojo:** Sector del termómetro, parte posterior que permite la medición de la temperatura corporal.

**PROCEDIMIENTO:**

	<b>Frecuencia:</b> Al ingreso del edificio, por cada persona que ingrese.
	<b>Responsables:</b> Conserjes, auxiliares y/o personal designado.



**1) Uso de termómetro.**

- Mantener el lector infrarrojo limpio, evitar que se ensucie.
- Asegurar no obstaculizar el infrarrojo.
- Revisar y asegurar que las pilas estén cargadas.
- Mantener stock de pilas para el termómetro.
- Mantener protegido de las inclemencias del tiempo.



**2) Medición.**

- Colocar termómetro a distancia de 3 a 5 cm de la frente, cuello o muñeca.
- Realizar medición apretando una sola vez el gatillo.
- Visualizar en pantalla el registro.
- Si temperatura es inferior a 37.8°C. La persona podrá ingresar.



**3) Persona con temperatura mayor a 37.8°C.**

- Indicará a la persona que no puede ingresar a la universidad.
- Mostrar a la persona, la medición de temperatura registrada en el equipo.
- Si es funcionario, indicarle que debe informar a su jefatura directa.
- Si es estudiante, indicarle que debe informar a su jefe de carrera.
- Registrar la medición y avisar de inmediato la situación a Administrador pertinente al Campus. Ver [Planilla de Control de Temperatura](#).
- Administrador de Campus, informa a Departamento de Prevención de Riegos o al Programa Universitario Saludable, según