
	INSTRUCTIVO COVID19	Código: IT-COVID 007 Versión: 01
	USO DE MASCARILLA PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19	Fecha de vigencia: 20/07/2020 Páginas: 1 de 1

DEFINICIONES:

Mascarilla: Elemento de tela o material resistente que se coloca sobre nariz y boca, afianzada con bandas de sujeción, en la cabeza u orejas que actúa como barrera protectora para evitar la proyección o recepción de partículas de gotículas de saliva.

PROCEDIMIENTO:

	Uso de mascarilla para la prevención de contagio de COVID-19.	Frecuencia: Permanente durante la jornada laboral y en trayectos.
		Responsables: Comunidad universitaria y personas externas que ingresen a la Universidad.




1) Lave con agua y jabón o en su defecto aplique alcohol gel sobre sus manos antes de manipular y/o utilizar la mascarilla.




2) Tome la mascarilla desde las bandas de sujeción y fíjela sobre su boca y nariz, procurando que cubra correctamente.



3) No se retire la mascarilla en ningún momento mientras realiza su trabajo, de ser necesario, debe hacerlo en un lugar limpio y seguro donde no se exponga a contacto directo con covid-19. Si no comparte oficina, puede retirarla momentáneamente.

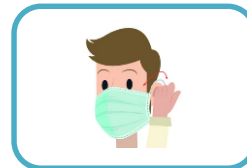

4) Para retirar la mascarilla reutilizable de manera segura, debe tomar las bandas de sujeción procurando no tocar la cara interna ni externa, para evitar contaminación. Si apoya la mascarilla en una superficie, recuerde higienizar el lugar de contacto antes y después.

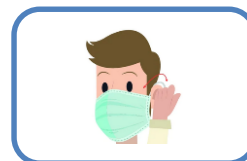

5) Realice recambio de mascarilla, idealmente cada vez que se humedezca por completo en la zona de la boca y nariz.



6) El lavado de mascarilla debe realizarse con detergente normal y agua tibia, luego enjuague y deje secar para su reutilización.